

# Rigel SafeTest 60

## Analizator Bezpieczeństwa

### Szybki Start

#### Ostrzeżenia bezpieczeństwa

**Uwaga niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego!**  
Należy bezwzględnie przestrzegać wskazanych instrukcji by uniknąć porażenia elektrycznego.

**Ważne, postępuj według instrukcji!**  
Ten symbol wskazuje, że instrukcja musi być przestrzegana by uniknąć niebezpieczeństwa.

**Uwaga**  
Podczas wielu testów prądu upływu przewód ochronny/uziemiający badanego urządzenia jest przerywany. Z tego powodu należy zadbać o dodatkowe formy zabezpieczenia by zachować należy standard bezpieczeństwa.

**Bezpieczeństwo**  
Nie wolno podłączać żadnego rodzaju sond do napięcia powyżej dozwolonego 30VAC/DC względem potencjału uziemienia podczas testów nie wymagających zasilania. Ryzyko porażenia elektrycznego.


#### Należy przyjąć, że dalsza, bezpieczna praca nie jest możliwa:

- Jeśli urządzenie lub jego przewody mają widoczne uszkodzenia
- Jeśli urządzenie nie funkcjonuje poprawnie
- Po długim okresie przechowywania w niekorzystnych warunkach środowiskowych

## Wprowadzenie

Zapoznaj się, ze swoim nowym poręcznym analizatorem bezpieczeństwa elektrycznego Rigel SafeTest 60. Ten przewodnik pomoże Ci go skonfigurować i wykorzystać wszystkie jego zalety.

### 1 Poznaj swój SafeTest 60

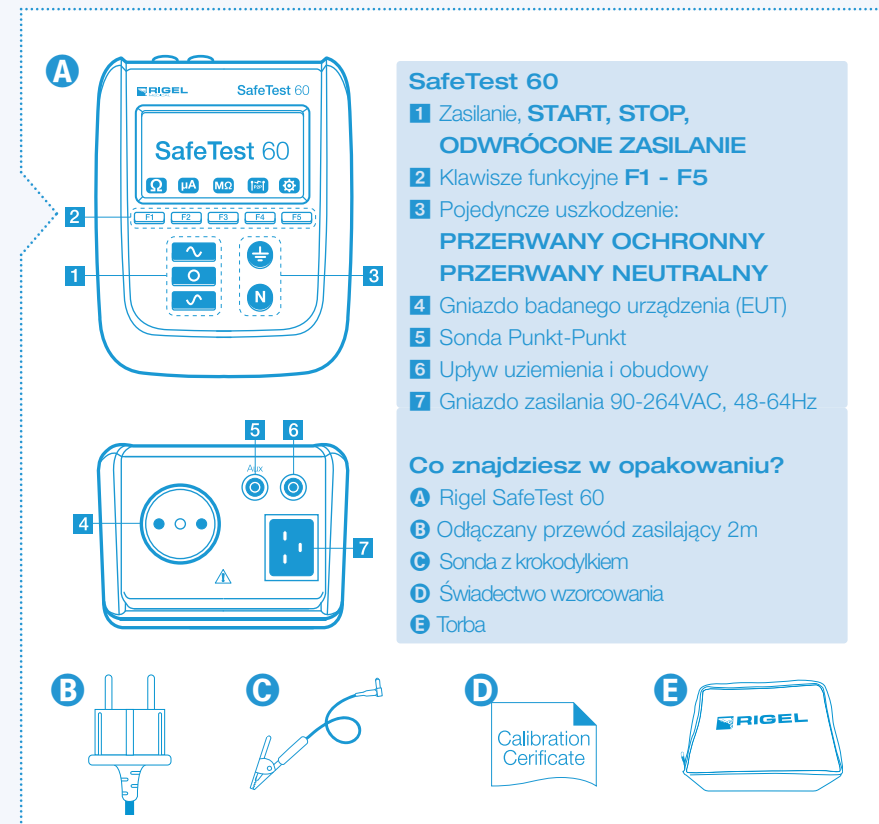

#### UWAGA

Jeśli brakuje jakiegось elementu wyposażenia w Twoim nowym testerze, niezwłocznie skontaktuj się z dostawcą.

## 2

## Rozpoczynamy

W tej sekcji zidentyfikujemy niektóre z podstawowych funkcji Rigel SafeTest 60 i podpowiemy jak rozpocząć.

### Włączamy

Aby włączyć Rigel SafeTest 60, podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania. SafeTest 60 uruchomi się automatycznie.

## 3

## Wykonywanie testów

Z ekranu głównego wybierz żądany test;



TEST PRZEWODU OCHRON-  
NEGO / UZIEMIAJĄCEGO



TEST PRĄDU UPŁYWU



TEST REZYSTANCJI IZOLACJI



TEST PUNKT - PUNKT







MENU USTAWIEŃ (zmiana języka i normy testu)



## 3a

## Menu Ustawień

Wybierz  z menu głównego by wejść w tryb ustawień;

- Wciśnij  by zmienić język na żądany
- Wciśnij  by zmienić na wybraną normę testu
- Wciśnij  by zobaczyć informacje o testerze (hardware i software)
- Wciśnij  by zatwierdzić ustawienia i powrócić do menu głównego.



## Potrzebujesz więcej?

Ten przewodnik szybkiej obsługi został zaprojektowany do użycia wraz z pełną instrukcją obsługi Rigel SafeTest 60, dostępna do pobrania na stronie:

[www.rigelmedical.pl](http://www.rigelmedical.pl) zakładka 'Do Pobrania' / Instrukcje

Odpowiedzi na pytania techniczne w formie not aplikacyjnych można znaleźć na stronie [www.rigelmedical.pl](http://www.rigelmedical.pl) w zakładce 'Do Pobrania' / Noty Aplikacyjne. Informacje te są regularnie aktualizowane i zwykle zawierają odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Jeśli potrzebujesz jeszcze więcej informacji skontaktuj się z nami:

### SAMSO Urządzenia Pomiarowe

e-mail: [info@rigelmedical.pl](mailto:info@rigelmedical.pl)

Tel: +48 94 342 06 40

### Serwis i wzorcowanie

e-mail: [serwis@rigelmedical.pl](mailto:serwis@rigelmedical.pl)

Tel: +48 94 342 06 40

Więcej informacji na [www.rigelmedical.pl](http://www.rigelmedical.pl)

Wer 1.0PL

Rigel Medical, Bracken Hill, South West Industrial Estate,  
Peterlee, Co. Durham, SR8 2SW, UK

Tel: +44 (0) 191 587 8730

Email: [sales@rigelmedical.com](mailto:sales@rigelmedical.com)

Web: [rigelmedical.com](http://rigelmedical.com)

Część 